




Hebon

Gebruiksaanwijzingen speekselmonster afnameset (Oragene•DNA OG-600)

Lees vóór de afname alle onderstaande instructies.

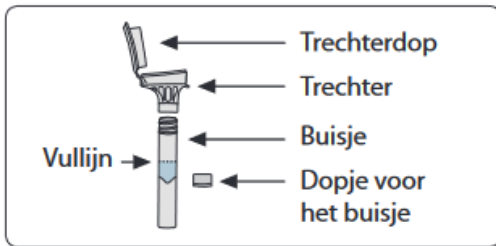

Voorzorgen bij afname:


Voordat u uw speekselmonster afstaat mag u 30 minuten daarvoor NIET eten, drinken, roken of kauwgom kauwen.

De dunne plastic film NIET van de trechterdop verwijderen.


Inhoud: Kit bevat stabilisatievloeistof.

Procedure:


Bij de meeste mensen duurt het tussen 2 en 5 minuten om een speekselmonster te geven volgens stappen 1 t/m 5.

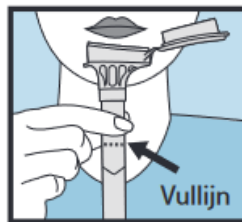


- 1 Spuw in de trechter totdat de hoeveelheid speekselvloeistof (geen belletjes) de in afbeelding 1 getoonde vullijn (fill line) bereikt.

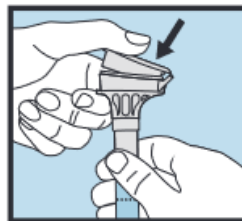


- 2 Houd het buisje met de ene hand rechtop. Sluit met de andere hand het buisje af met de dop (zoals afgebeeld) door stevig op de dop te drukken totdat u een luide klik hoort. De vloeistof in de dop loopt het buisje in en mengt zich met het speeksel. Zorg ervoor dat de dop stevig gesloten is.

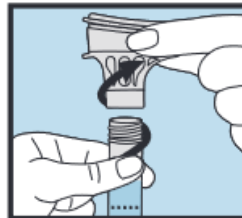

- 3 Houd het buisje rechtop. Schroef de trechter van het buisje af.

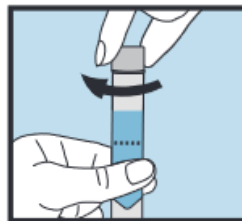

- 4 Gebruik het dopje om het buisje stevig te sluiten.

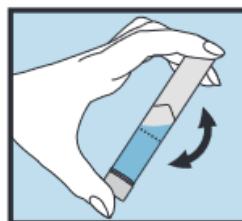

- 5 Schud het buisje met het dopje erop gedurende 5 seconden.

Het buisje met speeksel en vloeistof kunt u terug sturen naar Hebon in de bijgevoegde buisjeshouder en blauwe retourenvelop. Vergeet daarbij niet het labformulier toe te voegen, inclusief datum van speekselafname. De overgebleven materialen kunt u daarna weggooien.



Hebon

Labformulier Hebon biobank (*meesturen in blauwe retourenvelop*)

Hebon nummer (*graag nog invullen*):

Materiaal: Speeksel

Betreft: Het verzamelen van speeksel voor wetenschappelijk onderzoek naar erfelijke borst- en eierstokkanker onder de Hebon studie: Hebon biobank.

Datum speekselafname (*graag nog invullen*):